



Icon

Inovativni način rješavanja točkastih bijelih lezija

Blaga metoda za korekciju kariogenih bijelih mrlja
Bez nepotrebnih gubitaka zdravih zubnih struktura
Terapija pogodna za doktora kao i za pacijenta

Icon

Liječenje infiltracijom u 3 koraka

JETKANJE - SUŠENJE - INFILTRACIJA

Svi potrebni materijali sadržani su u Icon pakiranju.

1. Icon-ETCH

Materijal za jetkanje

Icon Etch priprema zub za infiltraciju. HCL gel se nanosi na zahvaćeno područje pomoću specijalnog nastavka za aplikaciju. Na taj način odstranjujemo prividno netaknuti površinski sloj. Jedino u slučaju otklanjanja ovog sloja infiltrant može prodrijeti u sustav zubnih pora.

2. Icon-DRY

Sljedeći korak u postupku infiltracije je sušenje područja Icon-Dry-om i zrakom.

3. Icon-INFILTRANT

Nakon pripreme nanosimo infiltrant (vrlo tekuću smolu) na zahvaćeno područje. Kapilarno djelovanje uvlači infiltrant duboko u poroznu caklinu. Infiltrant se osvijetljava. Bijele mrlje će biti zamaskirane. Infiltrirana područja nalik su prirodnoj caklini.

Zdrava zubna struktura je očuvana.

Starter kit:
2 terapijske jedinice od kojih svaka sadrži
(1 štrcaljka Icon-Etch 0,45 ml, 1 štrcaljka Icon-Dry 0,45 ml,
1 štrcaljka Icon-Infiltrant 0,45 ml,
6 Vestibular nastavci, 1 Luer-Lock nastavak)

Economy pak: 7 terapijskih jedinica

Metoda toliko uvjerljiva
da se postavlja samo
jedno pitanje !
Zašto nije postojala i prije ?

ICON I TOČKASTE BIJELE LEZIJE



Početna situacija: bijele mrlje nakon skidanja bravica



Nanošenje Icon-Etch-a. Priprema zuba za infiltraciju.



Sušenje sa Icon-Dry-om i vizualna provjera



Nanošenje Icon-infiltranta



Ponovno nanošenje Icon-infiltranta



Rezultat nakon svjetlosne polimerizacije



Rezultat nakon poliranja



Pacijent tjedan dana nakon postupka